

Avec BRO au-dessus des seuils

Trucs et astuces pour une manipulation sûre des seuils

BRO propose des fonctions fascinantes avec lesquelles il peut surmonter une grande variété d'obstacles. Mais la prudence est de mise en ce qui concerne les seuils. Veuillez respecter les conseils et astuces suivants lorsque vous conduisez sur des traverses BRO.

Pour des informations plus détaillées sur les différents types de seuils et les modes BRO appropriés, visitez notre [Centre d'aide](#).

Avez-vous des questions sur BRO et comment conduire des traverses avec ? Nous sommes heureux de vous aider. Contactez-nous simplement à sales@scewo.ch, ou contactez l'un de nos partenaires.

Mode de conduite



gonfler **jusqu'à 5 cm**



gonfler **à partir de 5 cm**



Seuils autoportants **jusqu'à 5 cm¹**



Seuils autoportants **à partir de 5 cm**

¹Avec les traverses autoportantes, le BRI nécessite suffisamment d'espace pour s'approcher et se balancer.

Mode escalier



gonfler **jusqu'à 20 cm**



gonfler **à partir de 20 cm**



Seuils autoportants



✓ BRO peut conduire sur le seuil.



✗ Malheureusement, BRO ne peut pas franchir le seuil.